

Garantie Innotech
Innotech garantit ce support lombaire contre tout vice de matière et de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat.

Si vous décelez une anomalie, communiquez directement avec Innotech au 1 800 361-0228.

Réparations

- 1 - Communiquez avec Innotech, à Orillia, Ontario, Canada.
- 2 - Sur réception de l'autorisation, retournez le produit tel qu'indiqué, en y joignant la preuve d'achat comportant la date, à vos frais et à vos risques. Les réparations sous garantie seront effectuées à nos frais.
- 3 - Le produit vous sera retourné à vos frais et à vos risques.

Limitations

Cette garantie est nulle si le produit a été endommagé à la suite d'un usage non approprié ou inadéquat, ou d'un accident.

Important

Afin d'activer votre garantie, veuillez fournir les renseignements suivants et poster cette carte à notre attention. La garantie doit être envoyée dans les 15 jours suivant l'achat, le cachet de la poste faisant foi.

Validation de garantie

Nom de famille et initiale
Adresse
Ville Prov./État
Code postal/Zip Téléphone (.....)

Renseignements sur le produit acheté

Date d'achat Année Mois Jour
Où avez-vous acheté ce produit?
Nom
Adresse
Ville Prov./État
Où avez-vous entendu parler des supports Innotech?
Physiothérapeute Chiropraticien
Médecin Pharmacien Autre magasin
Annonces Bouche à oreille Autre
S'agit-il de votre premier produit de support Innotech? Oui Non
Si « non », combien d'autres produits avez-vous déjà possédés?
Aimeriez-vous recevoir de l'information sur nos autres produits?

Manuel d'instructions et guide de garantie

InclineSeating

LumbAirPlus


EmbraceAirPlus

EmbraceAirKing



UTILISATION DE NOTRE SYSTÈME PNEUMATIQUE BREVETÉ À RÉGLAGE VERTICAL

NOTA : Assurez-vous de toujours dégonfler le support complètement avant de tirer l'une ou l'autre des courroies de réglage.

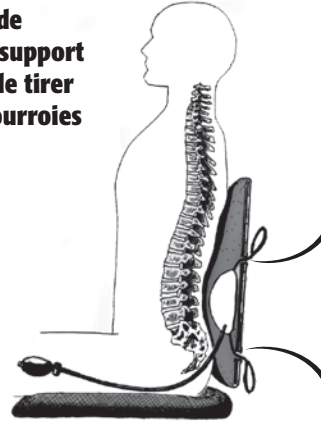

Tirez la courroie supérieure vers le haut pour faire monter la chambre à air.

Tirez la courroie inférieure vers le bas pour faire descendre la chambre à air.


COMMENT UTILISER VOTRE SUPPORT INNOTECH

Nous vous félicitons d'avoir judicieusement choisi un produit de support Innotech de haute qualité. Vous avez en effet investi dans un produit fabriqué à la main au Canada, qui intègre des matières brutes de toute première qualité.

Prenez soin d'observer les instructions qui suivent et votre support Innotech durera de nombreuses années.


VOTRE NOUVEAU SUPPORT INNOTECH

3e étape
Fixez les bandes du coussin de façon égale sur les bandes en velcro du support EmbraceAirPlus, EmbraceAirKing ou EmbracePlus. Appuyez fermement.

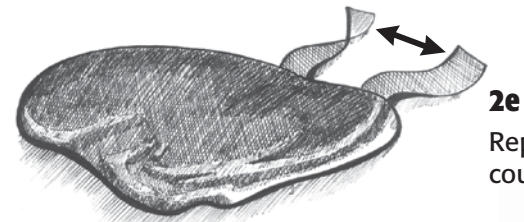

1re étape
Fixez les bandes en velcro qui se trouvent à l'intérieur de la housse, à l'arrière, directement sur le cadre en bois du support EmbraceAirPlus, EmbraceAirKing ou EmbracePlus.

COMMENT FIXER LE COUSSIN INLINESEATING OPTIONNEL

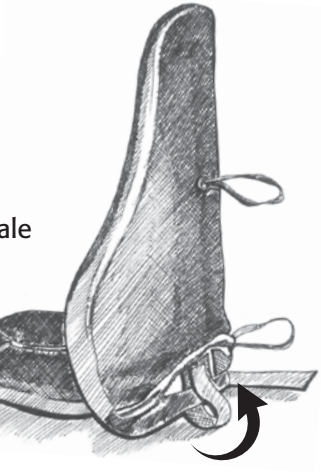

2e étape
Repérez les bandes en velcro du coussin InclineSeating.



C'est vous qui déterminez la fermeté du support. Des variations peuvent se produire en raison des fluctuations de température, de changements de pression excessifs ou tout simplement avec le temps. Une légère variation est normale, mais généralement, le support devrait conserver sa fermeté pendant plusieurs heures. Selon vos préférences, nous vous recommandons de modifier la fermeté de temps à autre. Cette mesure a en principe pour effet de modifier quelque peu votre cycle microcirculatoire et pourrait atténuer une sensation d'inconfort ou une raideur musculaire attribuable à une période prolongée en position assise.

Ce produit contient-il du latex?
Oui, une petite quantité de latex est utilisée dans la fabrication de la pochette pneumatique.

Puis-je régler la longueur du tube?
Oui, la longueur du support lombaire est amplement suffisante pour en faciliter le fonctionnement. Si vous désirez raccourcir le tube, il suffit d'enlever la poire et la valve, de couper à la longueur désirée et de rattacher la poire et la valve.

Combien de fois dois-je comprimer la poire?
Jusqu'à ce que vous ayez atteint une position confortable; plus vous compressez la poire, plus le support deviendra ferme. Le support sera vraiment ferme après trente pressions. Ne dépassez pas 30 pressions.

Quelle est la nécessité d'un système de réglage breveté?
Chaque personne est différente. Quand vous vous asseyez dans une voiture, sur une chaise ou sur un divan, la position du plateau de siège a pour effet de vous raidir (dur) ou de vous avahir (mou). Cette position affecte la hauteur de la courbe naturelle de votre colonne lombaire. Notre système de réglage vertical breveté vous aide à pallier ces changements et à placer votre colonne lombaire avec précision en fonction des fluctuations de hauteur. Rappelez-vous de toujours dégonfler le support avant de régler la chambre à air.

FOIRE AUX QUESTIONS ET DÉPANNAGE

Garantie Innotech
Votre support lombaire fabriqué à la main et inspecté individuellement est garanti contre tout vice de matière et de fabrication pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Une garantie à vie est offerte sur les composantes de la valve. Afin de valider cette garantie, la carte de garantie ci-jointe doit être remplie et retournée dans les 15 jours suivant la date d'achat. Les réparations sous garantie sont effectuées sans frais, mais tous les frais d'expédition demeurent à la charge du client. Pour toute question, composez le 1 800 361-0228, heure normale de l'Est.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Notre tissu exclusif, Innotex^{MC}, est offert uniquement sur les supports lombaires Innotech. Il a été traité afin d'être immunisé contre la formation de champignons, de bactéries et d'odeurs. Il résiste à l'humidité mieux que la soie, le coton, la laine ou les tissus synthétiques. Pour enlever la poussière, utiliser un aspirateur. Pour nettoyer une tache, utiliser tout nettoyant pour ameublement recommandé de haute qualité. Bien suivre les directives du fabricant.



Innotech Rehabilitation Products Inc.
P.O. Box 534,
Orillia, Ontario, Canada
L3V 6K2